

Samenvatting van de productkenmerken

1. Naam van het geneesmiddel

Kaliumhydroxide 30%, diagnosticum.

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Bevat per flacon van 30 ml: 9 gram kaliumhydroxide. De oplossing heeft een concentratie van 300 mg/ml kaliumhydroxide.

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. Farmaceutische vorm

Diagnosticum

4. Klinische gegevens

4.1 Therapeutische indicaties

Kaliumhydroxide wordt gebruikt als diagnosticum voor:

- (microscopisch) detecteren van dermatomycose

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering

Niet van toepassing

Wijze van gebruik

Een druppel kaliumhydroxide 30% wordt toegevoegd aan het afgenomen materiaal (huid, haar of nagelmonster) op een objectglaasje en afgedekt met een afdekglasje. Afhankelijk van het materiaal wordt na 15-30 minuten of 1-2 uur het materiaal beoordeeld onder een microscoop. Een kaliumhydroxide preparaat is positief als schimmeldraden of -sporen worden aangetroffen (zie NHG standaard Dermatomycosen).

4.3 Contra-indicaties

Niet van toepassing.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Vermijd contact met huid en ogen, bij contact spoelen met veel water.
Kan brandwonden veroorzaken.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen

Niet van toepassing.

4.6 Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Niet van toepassing.

4.8 Bijwerkingen

Niet van toepassing.

4.9 Overdosering

Niet van toepassing.

5. Farmacologische eigenschappen

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: niet van toepassing.

Kaliumhydroxide lost celwanden en hoornmateriaal op, maar niet schimmeldraden. Een kaliumhydroxide preparaat is positief als schimmeldraden of – sporen worden aangetroffen

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Niet van toepassing.

6. Farmaceutische gegevens

6.1 Lijst van hulpstoffen

Water voor injectie

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheid

3 maanden

6.4 Speciale voorzorgen bij opslag

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Dit product is een flacon van 30 ml met glazen pipetmontuur. Eén verpakking bevat 1-3 flacons.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

7. Fabrikant

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem

8. Datum van herziening van de tekst

Januari 2017