

Samenvatting van de productkenmerken

1. Naam van het geneesmiddel

Kaliumhydroxide 10%, diagnosticum.

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Bevat per flacon van 30 ml: 3 gram kaliumhydroxide. De oplossing heeft een concentratie van 100 mg/ml kaliumhydroxide.

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. Farmaceutische vorm

Diagnosticum

4. Klinische gegevens

4.1 Therapeutische indicaties

Kaliumhydroxide wordt gebruikt als diagnosticum in de gynaecologie voor:

- (Microscopisch) detecteren van bepaalde schimmelsoorten en bacteriële vaginose

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering

Niet van toepassing.

Wijze van toediening

Enkele druppels kaliumhydroxide oplossing toevoegen aan fluor vaginalis op een druppelplaat.

4.3 Contra-indicaties

Niet van toepassing.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Vermijd contact met huid en ogen, bij contact spoelen met veel water.
Kan brandwonden veroorzaken.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen

Niet van toepassing

4.6 Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Niet van toepassing.

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Vruchtbaarheid

Niet van toepassing.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Niet van toepassing.

4.8 Bijwerkingen

Niet van toepassing.

4.9 Overdosering

Niet van toepassing.

5. Farmacologische eigenschappen

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: niet van toepassing.

Werkingsmechanisme

Enkele druppels kaliumhydroxide oplossing op de fluor geven een typische vis geur af bij een positieve test. Deze test wordt ook wel een aminetest genoemd. Indien de test positief is, is er sprake van vluchtige aminen die de typische rottende vislucht afgeven.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Niet van toepassing.

6. Farmaceutische gegevens

6.1 Lijst van hulpstoffen

Water voor injecties

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheid

3 maanden

6.4 Speciale voorzorgen bij opslag

Bewaren beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Kaliumhydroxide-oplossing is verpakt in een glazen flacon van 30 ml met glazen pipetmontuur.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

7. Fabrikant

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem

8. Datum van herziening van de tekst

Mei 2021